

# Щипцы

## для открытия крышек брекетов H4/Pitts21

Артикул 946.1001



Ortholight

Искусство быть на высоте

НОВИНКА ОТ  
OC ORTHODONTICS



### Открытие заклинивших крышек без дискомфорта для пациента

Щипцы для открытия крышек брекетов H4/Pitts21 были специально разработаны для открытия заклинивших крышек в результате скопления налёта и плохой гигиены. Инструмент прилагает возвратное усилие к крышке и телу брекета, которое приводит к открытию крышки, которая заклинила из-за чрезмерного образования налёта без причинения дискомфорта пациенту.

### Особенности и преимущества

- 1) Разработан специально для брекетов H4/Pitts21
- 2) Инструмент был сделан для быстрого и комфортного открывания крышки брекета
- 3) Уникальный кончик разработан для специализированного взаимодействия с выступами на крышке и теле брекета

# Инструкция по применению



orthodontics  
Finish with the Best

Инструмент для открытия крышек брекетов H4/Pitts21 разработан для открытия фиксирующей крышки на брекетах H4/Pitts21 пассивных самолигирующих брекет-систем.

На зубах и брекетах часто образуется зубной налет, поэтому иногда требуется приложить дополнительные усилия для открывания крышки брекета при образовании на нём налёта. Когда мы используем щипцы для открывания, он создаёт встречные силы между крышкой и телом брекета, которых достаточно для открытия заклинившей крышки, с образовавшимся налётом, **без причинения дискомфорта пациенту!**



## Невероятно просто, как 1,2,3

- 1) Щипцы для открывания крышек брекетов H4/Pitts21 имеют два кончика: заострённый (кончик 1) и плоский (кончик 2).
- 2) Откройте щипцы для открывания и расположите Кончик 2 под окклюзионным лигатурным крылом брекета.
- 3) Удерживая кончик 2 под окклюзионным лигатурным крылом в открытом виде, расположите кончик 1 в выступ на крышке брекета. Возможно, будет необходимо слегка наклонить щипцы в сторону десны и слегка сжать ручки щипцов до тех пор, пока кончик 1 не зацепится за выступ на крышке брекета.
- 4) После того как оба кончика расположатся правильно под лигатурным крылом и на выступе крышки – откройте крышку, путём сжатия ручек щипцов. Кончики 1 и 2 создадут обратную силу между крышкой и телом брекета, крышка сдвинется в окклюзионную сторону, дав доступ к пазу.
- 5) Щипцы открывают крышку ровно на то расстояние, которое не позволит крышке покинуть тело брекета.

